

Reducept Dashboardhandleiding



Reducept

Blokhuisplein 40, 8911 LJ Leeuwarden, Nederland

E-mail: info@reducept.com

Tel: +31 85 13 08 260

KvK: 74239678

BTW: NL859821432B01

www.reducept.com

Reducept is onderdeel van RelieVR B.V.

Dashboard

Het Reducept dashboard is speciaal ontwikkeld voor behandelaren. Door middel van het dashboard kun je verschillende gebruikers en apparaten beheren, en kun je de prestaties van de verschillende spelers onder je behandeling in de gaten houden.

Hoe je toegang krijgt tot het dashboard

- 1. Je hebt een email ontvangen van Reducept met een uitnodiging om een account aan te maken op het dashboard. Klik op de link om naar het dashboard te gaan.
- 2. Kies een wachtwoord en bevestig je wachtwoord op het inlogscherm.

		0	
		IC I	
		reducent	
		reddeept	
	Maak wachtwoord aan		
	E-mail	demo@example.net	
	Wachtwoord		
	Bevestig wachtwoord	P	
		Uw wachtwoord moet minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 nummer bevatten	
Reducept - dashboard wordt aangeboden do Privacyverklaring - Handleiding	or RelieVR BV.		© 2017 - 2019 and powered by Grendel Games. All Rights Reserved Gentelels - Bootstrap Admin Tempiste by Colorib

Dashboard	=	Vragen? Neem contact op met +316 158 215 90 of mail naar support@reducept.com.	Taal 🗸 Jan-Jaap Severs 🗸
MENU			
😭 Home	Home		
MIJN ORGANISATIE	*		
Legisland Spelers	Welkom op he	et Reducept dashboard!	
e Personeel			
Apparaten		Activiteit de laatste maand	
1 Organisatie		Total aantal spActive speers© Totale speelduur1243:18	
BEHEER			

.....

Hoe je nieuwe spelers aanmaakt

1. Open het menu 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'.



www.reducept.com

.

2.	Klik op de menu-optie 'Spelers'. Je ziet nu een overzicht van alle spelers die gekoppeld zijn aan je organisatie.
	Dashboard MENU MENU MIJN ORGANISATIE ▲ Spelers Groepen Personeel
3.	Klik op de knop 'Voeg speler toe'. In het speleroverzicht verschijnen een aantal lege invulvelden.
	Spelers ↑ / Spelers
	♥ Voeg speler toe Filter op naam: Filter op naam

www.reducept.com

. .



4. Vul de gegevens van de nieuwe speler in en klik daarna op de knop 'Opslaan'.

lohn	Doe	iohndoe@amail.com	Geen		¥ Annuleren
John		Johndoesginal.com		Opsiaal	Annuleien

5. Er verschijnt een nieuw scherm waarin eventueel meer gedetailleerde informatie van de speler kan worden opgeslagen, en waar notities kunnen worden gemaakt. Klik op 'Opslaan'.

Hier kan je gedetailleerde informatie o	ver deze speler bekijken en bewerke	ın.
	Naam	John Doe
	E-mail	johndoe@gmail.com
	Geboortedatum	M
	Geslacht	Onbekend -
	Notities	
		B Opsiaan

.....

pelers							
1 / Spelers							
O Voeg spe							
• · · · · · · · · · · ·	ler toe						
Filter op naam	er toe				Filter pe	r groep:	
Filter op naam	e no				Filter pe	r groep: proepen	
Filter op naam Filter op naa Voornaam	ter toe	E-mail	Groep	Acties	Q Alle s	r groep: groepen	
Filter op naam Filter op naa Filter op naa Voornaam Demo1	ter toe	E-mail	Groep Geen	Acties @ Bekljken	Filter per Q Alle g Z Anpassen	r groep: groepen	🌣 Acties 🗸

. .

Hoe je de spelersstatistieken kunt bekijken

1. Open het menu 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'.



www.reducept.com

8. . <u>.</u>

	Home
	Spelers Spelers
	Groepen

. .

4. In het statistiekenscherm zie je een samenvatting van de sessies die deze speler tot dusver heeft gespeeld binnen de geselecteerde periode.

Periode selectie				
	Van 23-07-201	9		
	Tot 06-08-201	9		
	 Bekijke 	m		
Pijnlokaties	Samenvatting			
	In de periode van 23-07-19 tot (sessies betrof 0,3. De gemiddel	26-08-19 heeft patient, verdeeld over 1 sess d pijnscore aan het eind van deze sessies b	ies, in totaal 2 minuten Reducept gespeeld. De ge etrof 0. De gemiddelde afname van pijn per sessie	middelde pijnscore aan het begin van deze betrof 0,28.
	Statistieken			
	co Aantal sessies	() Totale speelduur	() Gemiddelde start-pijnscore	③ Gemiddelde eind-pijnscore
	1	0:02	0,3	0

5. Je kunt statistieken uit een specifieke periode bekijken door onder 'Periode selectie' de start- en einddatum van de gewenste periode in te voeren. Klik daarna op 'Bekijken'. Het statistiekenscherm toont nu de spelerstatistieken uit de gewenste periode.

Van	25-02-2019	
Tot	06-08-2019	
	Ø Bekijken	

Hoe je apparaten koppelt aan je organisatie

- 1. Het koppelen van Oculus headsets aan je organisatie vindt plaats door in de Reducept app in te loggen met je beheerdersaccount. Volg de stappen in de het hoofdstuk 'Inloggen in de Reducept app'.
- 2. Open het menu 'Apparaten' onder 'Mijn organisatie'.

Dashboard	
A Home	
MIJN ORGANISATIE	
Legislarian Spelers	
9 Personeel	
••• Apparaten	
û Organisatie	
BEHEER	
Abonnementen	

<complex-block>

3. Je ziet het apparaatoverzichtsscherm waar het nieuwe apparaat is toegevoegd aan het overzicht.

Hoe je spelers in en uitlogt op de Oculus Go

1. Open het scherm 'Apparaten' onder 'Mijn organisatie'. Je ziet het apparaatoverzichtsscherm.



www.reducept.com



Dashboard	=		Vragen? Neem contact op met +31 (0)	30 71 13 976 of mail naar support@reducept	t.com.	Taal 🗸	Demonstratie Account 🛩
MENU	Appara	ten					
	🕈 / Appa	raten					
MIJN ORGANISATIE							
Operand	Om	Reducept op een mobiel apparaat te spelen, moe	t dit apparaat gekoppeld worden aan eer	licentie. Op dit scherm kan je apparaten be	heren en een speler	inloggen op een apparaa	
		Naam		Ingelogde speler		Acties	
	1	Test Apparaat		Geen	+9 Inloggen	🕼 Aanpassen	Verwijderen

Miss Speler selectoren Miss OKAKEKTE ▲ Apparten / Test Apparat / Speler selectoren Proceel Selectore een speler dat dit apparaat gaat gebruiken door (son deel vari) hun naam in te velen. Proceel Selectore een speler dat dit apparaat gaat gebruiken door (son deel vari) hun naam in te velen. Orgenicatie Orgenicatie	
MUS ORGANISATIS ▲ Spelars ● Pressoned ■ Apparation ▲ Organisation	
Impose Spelers Impose Selecter een speler dat dit appraat gaat gebruiken door (ren deel var) hun naam in to witen. Impose Speler Impose Speler 1 Impose Impose	
Personal Personal Approxim Organisate	
PG Appenden Demonstrate Speler ¶	
ff Organization	



4. De geselecteerde speler is nu gekoppeld aan het apparaat.

	🔒 / App	araten				
Spelers	-					
• .	Spe	ler successvol ingelogd!				×
Apparaten	Om	Reducept op een mobiel apparaa	at te spelen, moet dit apparaat gekoppeld worden aan een licentie. Op dit scherm	ı kan je apparaten beheren en een speler	inloggen op een apparaat.	
🏛 Organisatie	#	Naam	Ingelogde speler		Acties	- 1
	1	Test Apparaat	Demonstratie Speler 1	G Uitloggen	Aanpassen 💼 Verwilden	en

Hoe je thuisgebruik toestaat

1. Open het scherm 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'. Je ziet het speleroverzichtsscherm.

Dashboard	
😭 Home	
MIJN ORGANISATIE	
La Spelers	~
Spelers	
Groepen	
Personeel	

2. Klik in het spelersoverzichtsscherm bij de nieuwe speler op de knop 'Acties' en daarna op 'Thuisgebruik beheren'.

A Home	Spelers								
	A / Sector								
MUN ORGANISATIE	n / Spees								
Spelers	~								
 Spelers 	Voeg speler toe								
Groepen	Nieuwe spelers deze m	aand: 2 / 10							
Personeel	Filter op naam:					Filter per groep:			
Apparaten	Filter op naam				Q	Alle groepen		*	
n Omanicatia	Voornaam	Achternaam	Groep	Actief tot		Acties			
	Demonstratie	Speler 1	Geen	09-03-202	0	Bekijken	🕼 Aanpassen	🏟 Acties -	
	Demonstratie	Speler 2	Geen	09-03-202	0	@ Bekiken	🕼 Aannassen	Profiel bewer	ken
						ar benjien	E Anipasen	U Thuisgebruik b	eheren
				_				Terwijderen	
				« 1 »					
	Reducept - dashboard wordt as Privacwerklaring - Handlaiding	angeboden door RelieVR BV.				@ 2017 - 2011	and powered by Gren	del Games. Al Rights Re atran Admin Tampiata ha	served.
	 macyverklaring - mandelding 						Genelela - Dool	so ap manini Template by	Contrillo

🛛 Thuisgebruik toestaan

 Klik op de aanmaker 	e knop 'Thuisgebruik toestaan'. De speler ontvangt een email met da n van een Reducept-account voor thuisgebruik.	arin instructies over het
Thuisge	ebruik beheren	×
Door thuis wachtwoo	sgebruik toe te staan kan deze player in de game inloggen met zijr ord. Hierdoor kunnen ze Reducept blijven spelen op hun eigen sma	n eigen emailadres en rtphone of VR toestel.
Wanneer t deze spel	thuisgebruik geactiveerd is zal er een email gestuurd worden naar ler met instructies voor het aanmaken van een wachtwoord.	het emailadres van

× Sluiten

www.reducept.com

s., (*